

Imidin® sanft Nasen-Pflegespray, steril

ARISTO

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

1. Zusammensetzung

Was ist in Imidin® sanft Nasen-Pflegespray enthalten?

Imidin® sanft Nasen-Pflegespray ist eine isotone Meersalzlösung, die gereinigtes Wasser, Meersalz, Dexpanthenol, Kaliumdihydrogenphosphat und Dikaliumhydrogenphosphat enthält.

Imidin® sanft Nasen-Pflegespray enthält keine Konservierungsmittel und keine Treibmittel.

2. Verpackungsgröße

Lösung zum Sprühen in die Nase.

Inhalt: 20 mL

Ein Sprühstoß entspricht 0,14 ml.

3. Zweckbestimmung

Wann wird Imidin® sanft Nasen-Pflegespray angewandt?

Zweckbestimmung:

Imidin® sanft Nasen-Pflegespray ist eine wässrige Lösung zum Sprühen in die Nase. Das Produkt wird zur Befeuchtung und Reinigung der Nasenschleimhaut und zur unterstützenden Behandlung von Erkältung oder Heuschnupfen eingesetzt.

Imidin® sanft Nasen-Pflegespray wird angewandt zur:

- Befeuchtung der Nase z. B. bei trockener Raumluft durch Heizung oder Klimatisierung.
- Reinigung der Nasenschleimhaut bei erhöhter Belastung durch Staub, Pollen, Rauch und Keime.
- Unterstützenden Behandlung von Erkältungen oder Heuschnupfen.
- Dexpanthenol ermöglicht eine sanfte Pflege für eine gestresste Nase.

Die Anwendung des Nasensprays führt somit zu einer Verbesserung des Wohlbefindens bei trockener, gestresster und blockierter Nase.

Imidin® sanft Nasen-Pflegespray ist auch für Säuglinge und Kleinkinder geeignet.

4. Dosierung und Art der Anwendung

Je nach Bedarf sprühen Erwachsene und Kinder ab zwei Jahren 1 - 2 Sprühstöße Imidin® sanft Nasen-Pflegespray in jedes Nasenloch ein.

Bei Säuglingen und Kleinkindern bis zu zwei Jahren ist ein Sprühstoß pro Nasenloch ausreichend. Imidin® sanft Nasen-Pflegespray sollte nicht länger als 30 Tage kontinuierlich angewendet werden.

5. Gegenanzeigen

Es gibt keine bekannten Gegenanzeigen.

Verwenden Sie Imidin® sanft Nasen-Pflegespray nicht, wenn eine bekannte Unverträglichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe vorliegt.

6. Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln

Wird Imidin® sanft Nasen-Pflegespray in Kombination mit einem anderen Nasenspray verwendet, sollte es vorher angewendet werden.

7. Schwangerschaft und Stillzeit

Bei sachgemäßer Anwendung stellt Imidin® sanft Nasen-Pflegespray bei Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit kein besonderes Risiko dar.

8. Nebenwirkungen

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

9. Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch

Bei Nasenverletzungen und nach Nasenoperationen sollte Imidin® sanft Nasen-Pflegespray nur nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt angewendet werden.

10. Anwendung

Wie sollten Sie Imidin® sanft Nasen-Pflegespray anwenden?

Entfernen Sie die Schutzkappe und nehmen Sie dann die Sprühflasche in eine Hand (Abb. 1). Entfernen Sie die Schutzkappe und drücken Sie den oberen Teil der Pumpe bis zum ersten Sprühstoß mehrmals nach unten. Die Flasche sollte während der Vorbereitung auf den Gebrauch senkrecht gehalten werden. (Abb. 2). Erwachsene und Kinder über 2 Jahre: Pumpen mehrmals täglich 1 - 2 Sprühstöße in jedes Nasenloch.

Kinder unter 2 Jahren: Pumpen mehrmals täglich 1 Sprühstoß in jedes Nasenloch. (Abb. 3).

Kleinkinder und Säuglinge sowie Personen, die Imidin® sanft Nasen-Pflegespray nicht allein anwenden können, sollten auf den Rücken gelegt und der Kopf sollte auf eine Seite gedreht werden, so dass die Flüssigkeit gut ablaufen kann (Abb. 4). Legen Sie eventuell ein Handtuch oder einen anderen Nässechutz unter den Kopf. Drücken Sie zunächst den Aufsatz einmal herunter, bis der erste Sprühstoß erfolgt (Abb. 2). Führen Sie nun die Sprühöffnung in das Nasenloch und pumpen Sie 1-mal. Nur so kann die Pumpe nach unten oder horizontal gerichtet optimal funktionieren.



(Abb. 1)



(Abb. 2)



(Abb. 3)



(Abb. 4)

Wie lange sollten Sie Imidin® sanft Nasen-Pflegespray anwenden?

Wenden Sie Imidin® sanft Nasen-Pflegespray bis zum Abklingen der Beschwerden an.

Während des Sprühvorgangs leicht einatmen. Nicht in die Augen sprühen und nicht auf andere Personen richten.

Aus hygienischen Gründen sollten Sie die Pumpe nach jedem Gebrauch abwischen und das Produkt nicht mit anderen Personen teilen.

11. Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Medizinproduktes

Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf der Faltschachtel und dem Etikett aufgedruckt.

Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

STERILE A Steril



Nicht über 25 °C lagern.

Das Spray kann nach der ersten Anwendung für 12 Monate verwendet werden.

12. Wie ist Imidin® sanft Nasen-Pflegespray aufzubewahren?

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. Stand der Information

Juni 2018



HÄLSA Pharma GmbH
Maria-Goeppert-Str. 5
23562 Lübeck
Deutschland
vigilance.haelsa@diapharm.de
Telefax: +49 251 60935-320

Vertrieb:

ARISTO

Aristo Pharma GmbH
Wallenroder Straße 8-10
13435 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 30 71094 4200
Telefax: +49 30 71094 4250

CE 0482

Erklärung zu den verwendeten Symbolen

	Gebrauchsanweisung beachten!
LOT	Kennzeichnung des Herstellungspostens (Chargenbezeichnung)
	Verwendbar bis
CE	CE-Kennzeichen
	Hersteller
REF	Katalognummer
	Vor Hitze schützen
STERILE A	Steril