

1xklysmasalinisch

Gebrauchsfertiges Klistier zum Einlauf

Zusammensetzung:

100 ml enthalten:

Natriumdihydrogenphosphat 2 H ₂ O	16,0 g
Dinatriumhydrogenphosphat 2 H ₂ O	2,98 g
Natriumbenzoat	0,12 g
Gereinigtes Wasser	

Anwendungsgebiete:

Zur raschen Stuhl-Entleerung des Enddarms z. B. vor Operationen, diagnostischen Eingriffen wie Röntgenuntersuchungen oder Darmspiegelungen und Geburten.

Vorsicht:

Nur mit Vorsicht bei älteren und geschwächten bzw. gebrechlichen Patienten sowie bei Patienten mit bereits bestehenden Elektrolytstörungen verwenden.

Nur zum einmaligen Gebrauch. Die Wiederverwendung oder Wiederaufbereitung von Medizinprodukten zum einmaligen Gebrauch kann zu Kontamination führen.

Plastikbehälter nach Gebrauch wegwerfen, auch wenn nicht der gesamte Inhalt verwendet wurde. Nur klare Lösungen in unversehrten Behältnissen verwenden.

Nach Ablauf des Verfalldatums darf das Produkt nicht mehr angewendet werden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Gegenanzeigen:

Dieses Produkt nicht verwenden bei:

- Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion.
- Erschwerten Darmbewegungen aufgrund einer Obstruktion oder Blockade.
- Erkrankungen, bei denen der Darm entzündet oder geschwollen ist, und die zu Krämpfen, Schmerzen, Verstopfung und Durchfall führen können, z. B. bei der Hirschsprung-Krankheit (Morbus Hirschsprung).
- Verletzung der Analregion, verursacht z. B. durch eine Darmperforation oder eine Fissur.
- Postoperativem Unvermögen, Stuhl durch den Darm zu bewegen.
- Alle Erkrankungen, bei denen es wahrscheinlich ist, dass vermehrt Elektrolyte (Salze im Blut), wie z. B. Natrium oder Phosphat, aus dem Darm absorbiert werden.

Dieses Präparat ist für Säuglinge und Kinder unter 6 Jahren nicht geeignet.

Nebenwirkungen:

Es kann zu Reizungen der Darmschleimhaut kommen. In seltenen Fällen wurde ein Rückgang von Weichteilgewebe um den Enddarm (Dickdarmgangrän) aufgrund schwerer Geschwürbildung oder aufgrund von Wunden mit der Anwendung von Phosphat-haltigen Klistieren bei älteren Patienten assoziiert.

Es wurde über einen erhöhten Phosphatgehalt und einen verringerten Calciumgehalt im Blut oder über weitere schwere Elektrolytstörungen mit der Folge schwerer Muskelkrämpfe berichtet.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Ein hoher Phosphat- und Natriumgehalt sowie ein geringer Calciumgehalt im Blut treten mit erhöhter Wahrscheinlichkeit bei der Anwendung von Phosphat-haltigen Klistieren bzw. bei der oralen Gabe von Abführmitteln an Patienten auf, die Diuretika oder andere Medikamente erhalten, die den Elektrolytgehalt im Blut beeinträchtigen können.

Dosierung:

Soweit nicht anders verordnet:

Im Allgemeinen der Inhalt einer Flasche für den Erwachsenen.

Art und Dauer der Anwendung:

Als Einlauf in den Darm.

Zum Gebrauch der Flasche den Verschlussknebel abdrehen und das Ansatzrohr leicht einfetten (z. B. mit Vaseline). Beim Einführen des Ansatzrohres in den After soll der Patient möglichst in linker Seitenlage liegen. Durch leichten Druck auf den Plastikbehälter wird der Inhalt langsam in den Enddarm eingespritzt. Der Plastikbehälter muss auch noch während des Entfernens zusammengedrückt bleiben.

Der Patient soll seinem Entleerungsdrang möglichst 15 – 20 Minuten nicht nachgeben, damit eine nachhaltige Entleerung des Enddarms gewährleistet ist. Erfolgt eine vorzeitige Entleerung, so ist eine wiederholte Anwendung gefahrlos.

1xklysmasalinisch ist nicht zum Dauergebrauch vorgesehen. Es kann jedoch nach Bedarf in unregelmäßigen Abständen wiederholt angewendet werden.

Hinweis:

1xklysmasalinisch kann leicht gelb gefärbt sein. Diese Verfärbung beeinträchtigt die Wirksamkeit des Produktes nicht.

Packungsgrößen:

REF 3319: 1 Plastikflasche mit 135 ml
REF 3320: 10 Plastikflaschen mit 135 ml

Stand der Information:

2017-08



Serumwerk Bernburg AG
Hallesche Landstraße 105 b
06406 Bernburg, Germany

serumwerk
bernburg

