

Bitte lesen Sie vor jeder Anwendung von Multi-Gyn FloraPlus diese Produktinformation sorgfältig durch und bewahren Sie diese zur späteren Einsichtnahme auf.

Multi-Gyn FloraPlus

- + Lindert Juckreiz, Reizungen, Geruch und Ausfluss
- + Zur Vorbeugung und Behandlung von Scheidenpilzproblemen
- + Prebiotische Unterstützung der gesunden Vaginalflora
- + Beugt (wiederkehrender) Candida vor
- + Prebiotische Stimulation von Laktobazillen
- + Bekämpft viele schädliche Mikroorganismen
- + Verbessert den vaginalen pH-Wert
- + Bio-aktiv, mit dem natürlichen 2QR-Komplex

Wie wirkt Multi-Gyn FloraPlus?

Multi-Gyn FloraPlus ist ein Produkt auf der Grundlage des patentierten, bio-aktiven 2QR-Komplexes in Kombination mit prebiotischen Komponenten. Die Prebiotika sind die Nährstoffe in FloraPlus, die das Wachstum der guten und nützlichen Laktobazillen unterstützen. Multi-Gyn FloraPlus verbessert die Vaginalflora und den pH-Wert.

Der 2QR-Komplex ist eine aus Pflanzen gewonnene natürliche Substanz und besteht aus bio-aktiven Polysacchariden. 2QR hat die Eigenschaft, die Anhaftung zahlreicher schädlicher Bakterien an der Vaginalschleimhaut zu verhindern und sie auf natürliche Art und Weise zu neutralisieren. Dieser Blockademechanismus und die prebiotische Wirkung weisen keine bekannte Resistenzbildung auf. Sie basieren auch nicht auf toxischen Substanzen oder aggressiven Chemikalien. Durch diese Zusammensetzung verbessert Multi-Gyn FloraPlus die Vaginalflora.

Multi-Gyn FloraPlus hilft, die Vaginalflora im Gleichgewicht zu halten, indem es viele schädliche Mikroorganismen hemmt und die Entwicklung bzw. das Wachstum nützlicher körpereigener Laktobazillen (Milchsäurebakterien) fördert. Somit verbessert Multi-Gyn FloraPlus das natürliche, saure Scheidenmilieu, das vor Beschwerden schützt, die mit einem übermäßigen Wachstum von unerwünschten Mikroorganismen wie Candida einhergehen. Auf diese Weise ist Multi-Gyn FloraPlus wirksam bei der Vorbeugung und Behandlung von unterschiedlichen (wiederkehrenden) Vaginalproblemen. Es lindert unangenehme Beschwerden wie Ausfluss, Juckreiz, Reizungen, Geruch, Rötungen und Empfindlichkeit.

Multi-Gyn FloraPlus ist kein antimykotisches Arzneimittel; aufgrund der physikalischen Wirkweise des 2QR-Komplexes ist es als Medizinprodukt der Klasse IIa registriert.

Anwendungsbereiche:

- Juckreiz, Reizungen, Geruch und Ausfluss (durch eine gestörte Vaginalflora verursacht)
- gestörte bzw. unausgewogene Vaginalflora aufgrund der Menstruation, nach Geschlechtsverkehr, Schwimmen, Antibiotika-Therapie, etc.
- (wiederkehrende) Scheidenpilzprobleme (Candida)

Hinweis: Das Produkt behandelt keine sexuell übertragbaren Krankheiten (Geschlechtskrankheiten). Es beugt diesen auch nicht vor.

Aktive Inhaltsstoffe:

Galactoorabinan-Polyglucuronsäure-Kreuzpolymer*, Prebiotika
*2QR-Komplex: patentierte bioaktive Polysaccharide.


Multi-Gyn FloraPlus ist ein Produkt, das auf dem bio-aktiven 2QR-Komplex basiert. Zusätzlich enthält das Produkt prebiotische Komponenten, welche die Vaginalflora fördern und wiederherstellen. Die Formel enthält keine Hormone, Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs, aggressive Chemikalien oder Duftstoffe.

Gebrauchsanweisung:


- Für die Behandlung von Scheidenpilzproblemen: Verwenden Sie an fünf aufeinanderfolgenden Tagen jeweils kurz vor dem Schlafengehen eine Tube.
- Für eine schnelle Linderung von Juckreiz, Reizungen, Geruch und Ausfluss: Verwenden Sie eine Tube immer dann, wenn Sie eine Linderung der Symptome wünschen.

Anwendung


Multi-Gyn FloraPlus ist ein prebiotisches Vaginalgel, das in die Vagina eingebracht wird. Jede Tube enthält die Menge für eine Anwendung. Das prebiotische Vaginalgel wird mit einem speziellen Applikator in die Vagina eingeführt. Nach der Verwendung können Sie die Tube entsorgen. Für Hinweise zur Verwendung der Einweg-Tube siehe nachfolgende Abbildungen.

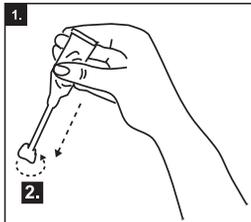


1. Schütteln Sie den Tubeninhalt in die Tubenspitze
2. Brechen Sie die Tubenspitze durch Drehung ab.

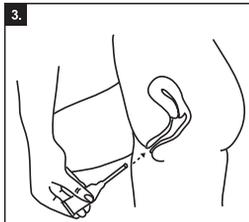

3. Führen Sie das schlanke Ende des Applikators (auf der Tube) sanft in die Vagina ein.

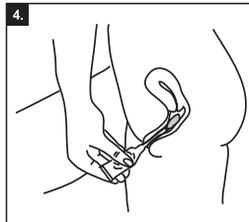

4. Drücken Sie sanft auf das dickere Ende der Tube, um das Gel in die Vagina einzubringen.

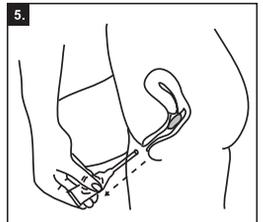

5. Entfernen Sie die Tube während Sie gleichzeitig gedrückt halten. Nach der Anwendung kann die Tube entsorgt werden.

- Zur Vorbeugung von Vaginalproblemen (z. B. wiederkehrender Hefepilzbefall): Zur Unterstützung der wichtigen Laktobazillen und zur Vorbeugung von verschiedenen Vaginalproblemen ist die Anwendung einer Tube FloraPlus alle drei Tage ausreichend.

Multi-Gyn FloraPlus sollte nicht länger als 30 aufeinanderfolgende Tage verwendet werden, sodass sich die Vaginalflora ohne Hilfe selbst regulieren kann. Bei anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden sollten Sie sich immer an Ihren Arzt wenden.

Wichtiger Hinweis!

Da es sich bei Multi-Gyn FloraPlus um ein aktives Produkt handelt, kann direkt nach der Applikation ein warmes, prickelndes Gefühl auftreten. Dies ist normal und sollte nach wenigen Minuten wieder verschwinden.

Nebenwirkungen

Das Produkt hat keine bekannten oder berichteten Nebenwirkungen. Da Multi-Gyn FloraPlus einen für die Vagina optimalen Säuregrad (niedrigen pH-Wert) besitzt und Sperma alkalisch ist (hoher pH-Wert), kann die Verwendung von Multi-Gyn FloraPlus die Spermaaktivität verringern. Multi-Gyn FloraPlus sollte daher nicht in der Phase des Eisprungs verwendet werden, sofern der Wunsch nach einer Schwangerschaft besteht. Multi-Gyn FloraPlus eignet sich nicht als Verhütungsmittel.

Allergische Reaktionen auf Multi-Gyn FloraPlus treten sehr selten auf. Bei bekannter Überempfindlichkeit auf pflanzliche Substanzen wird empfohlen eine geringe Menge von Multi-Gyn FloraPlus auf der Innenseite des Unterarms aufzutragen. Wenn sich eine juckende, gerötete Stelle bildet, könnte dies auf eine Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe von Multi-Gyn FloraPlus hindeuten. In diesem Fall raten wir von einer Anwendung von Multi-Gyn FloraPlus ab.

Wechselwirkungen mit Arzneimitteln

Multi-Gyn FloraPlus weist keine bekannten Wechselwirkungen mit Arzneimitteln auf.

Schwangerschaft und Stillzeit

Es sind keine Gegenanzeigen bei der Verwendung von Multi-Gyn FloraPlus während der Schwangerschaft und/oder Stillzeit bekannt.

Aufbewahrung

Multi-Gyn FloraPlus sollte bei Temperaturen zwischen 10°C und 25°C gelagert werden (Raumtemperatur). Bewahren Sie Multi-Gyn FloraPlus stets außer Sicht- und Reichweite von Kindern auf. Verwenden Sie Multi-Gyn FloraPlus nicht nach dem Verfallsdatum.

pH-Wert:

Der pH-Wert von Multi-Gyn FloraPlus beträgt 4,1.

Die Farbe des Gels

Die Farbe des bioaktiven Gels kann von farblos bis Bernsteinengelb variieren. Dies hängt mit dem Hauptwirkstoff, dem 2QR-Komplex, zusammen. Als reines Naturprodukt ist dieser natürlichen Farbschwankungen unterworfen. Wirksamkeit und Sicherheit des Produkts werden davon jedoch nicht beeinflusst.

Hintergrundinformationen

In der Vagina herrscht aufgrund der nützlichen Laktobazillen (Milchsäurebakterien) ein saures Milieu. Dies trägt dazu bei, dass ungewollte Bakterien und andere Mikroorganismen im Zaum gehalten werden. Eine Störung dieses Gleichgewichts zeigt sich meist in einem veränderten Ausfluss. Am meisten verbreitet sind die bakterielle Überwucherung, die sogenannte bakterielle Vaginose (B.V.), sowie Pilzbefall (Candida, Soor). Die bakterielle Vaginose wird meist begleitet von einem fischigen Geruch, Scheidenpilzprobleme zeigen sich eher durch Juckreiz, Brennen und dicken weißen Ausfluss.

Anmerkung: Die Tube wurde so entwickelt, dass die empfohlene Gelmenge eingeführt werden kann. Bei korrekter Anwendung bleibt eine geringe Menge an Gel in der Tube zurück.

Alleinvertrieb in Deutschland:

Ardo medicine GmbH, D-82234 Oberpfaffenhofen.
In Apotheken erhältlich: PZN: 06916208

Hergestellt von:

BioClin BV, Delftchpark 55,
2628 XJ Delft, Niederlande