

Endlich: Ein Wundgel zur Mehrfachanwendung



Granudacyn® Wundgel ist ein stabilisiertes, hydroaktives, amorphes Gel zur Rehydrierung von nekrotischem und fibrinösem Gewebe. Es unterstützt das autolytische Débridement und erzeugt ein physiologisches Wundheilungsmilieu.

Problemlose Mehrfachanwendung

Im Vergleich zu den meisten anderen Wundgelen kann Granudacyn® Wundgel nach Anbruch noch 90 Tage verwendet werden. Zudem ist es möglich, einen Gelspender für mehrere Patienten zu verwenden. Das Gel wird durch Natriumhypochlorit und hypochlorige Säure konserviert. Diese Stoffe sorgen für die Stabilität des Produktes und kommen auch in der körpereigenen Immunabwehr zum Einsatz.

Gute Verträglichkeit

Da Granudacyn® Wundgel gut verträglich ist, kann es auch auf freiliegenden Knochen, Sehnen und Bändern verwendet werden.

Indikationen

Granudacyn® Wundgel kann bei allen trockenen und schwach exudierenden Wunden verwendet werden. Dies umfasst ebenfalls alle Wunden, die rehydriert werden müssen, sowie Verbrennungen bis Grad 2.

Haltbarkeit

- Ungeöffnet bis zu 15 Monate bei Raumtemperatur haltbar.
- Nach dem Öffnen innerhalb von 90 Tagen zu verbrauchen.

Inhaltsstoffe

Aqua, Natrium Chloride, Hypochlorous Acid, Natrium Hypochlorite, Colloidal Silicate

Granudacyn® Wundgel ist ein umweltfreundliches Produkt, das ganz normal ohne besondere Vorschriften entsorgt werden kann.

Einfache Anwendung



A. Sollten sich beim Verbandswechsel noch Reste des Gels in der Wunde befinden, so können diese einfach mit Granudacyn® Wundspülung ausgespült werden.



B. Das Gel wird in einer Schichtdicke von 2–5 mm auf die gesäuberte Wunde aufgetragen und kann bis zu drei Tage auf der Wunde belassen werden.



C. Zur Abdeckung eignen sich alle üblichen Wundauflagen. Sollte Granudacyn® Wundgel in Wundhöhlen eingebracht werden, so müssen diese zusätzlich mit geeignetem Wundfüller (z. B. Alginate oder Hydrofasern) austamponiert werden.



Darreichungsformen

PRODUKT	PZN	MENGE	STK/VE	HALTBARKEIT	FALTSCHACHTEL	ART.-NR.
Granudacyn® Wundgel	11865269	50 g	12	15 Monate	x	GD010
	11865281	100 g	12		x	GD011
	12608020	250 g	15		x	GD007



www.granudacyn.de

SastoMed GmbH
Brüsseler Str. 2 | 49124 Georgsmarienhütte | Germany
Telefon: +49 (0)5401 365191-10 | Fax: +49 (0)5401 36519-18
service@sastomed.de

“Unser Ziel ist es, all denen, die heilen und pflegen, die bestmöglichen Produkte an die Hand zu geben.”

Granulox®

Wound oxygenizer

Hämoglobin Spray

Beschleunigt die Heilung durch zusätzlichen Sauerstoff



Granudacyn®

Wound irrigation solution + gel

Wundspüllösung und Wundgel

Reinigt auch kontaminierte Wunden

